


Voor gebruik:

- Controleer de cilinderdruk (1). (Wijzer moet in het rode, gele of groene gebied staan.)
- Controleer of de flowregelaar (2) op 0 staat.
- Controleer of er niets is aangesloten op de snelkoppeling (3) of slangtule (4).
- Draai langzaam de afsluiter (5) volledig open (tegen de wijzers van de klok in).
- Sluit de betreffende apparatuur aan (3 of 4). In geval van gebruik van de slangtule (4): selecteer de gewenste flow met de flowregelaar (2) (stapsgewijs verhogen).

Na gebruik:

- Draai de afsluiter (5) dicht (met de wijzers van de klok mee).
- Wanneer de flow is gestopt, verwijder de aangesloten apparatuur (3 of 4).
- Draai de flowregelaar (2) in de 0-stand (stapsgewijs verlagen).

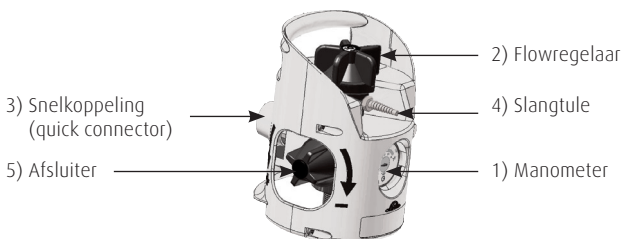

Bijkomende veiligheidsinformatie:

- Gebruikstemperatuur: - 20° tot +45°C.
- Gebruik alleen apparatuur bedoeld voor toediening van het product.
- Bereid u voor op het wisselen van de cilinder wanneer de wijzer van de manometer in het rode gebied staat.
- Stel de flowregelaar altijd in op een flowpositie en niet tussen flowposities in. (Dit om de juiste voorgeschreven flow te verkrijgen.)
- MRI-Compatibel bij MRI systemen ≤ 3.0T, met uitzondering van stalen cilinders. Indien het een stalen cilinder betreft, is dat onder andere op de cilinder met een sticker aangegeven. Houd de cilinder op ten minste 30 cm afstand van de magneetopening.
- In geval van lekkage van de afsluiter, of beschadiging aan de cilinder: sluit de afsluiter, hierdoor stopt de gasstroom. Zet de cilinder apart en retourneer deze aan de leverancier.
- **Lees de gebruiksaanwijzing en bijsluiter zorgvuldig en volg de aanwijzingen strikt op!**

Linde Healthcare Benelux

Voor Nederland:

De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland
 Tel. +31 40 282 58 25, Fax +31 40 281 68 75
 info.lgt.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Voor België & Luxemburg:


Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen, België
 Tel. +32 70 233 826, Fax +32 70 233 828
 info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be

Avant utilisation:

- Vérifier la pression (1). (L'aiguille doit se trouver dans la zone rouge, jaune ou verte.)
- Vérifier que le sélecteur de débit (2) indique la position zéro.
- S'assurer que rien n'est connecté à la prise rapide (3) ou à la prise navale (4).
- Ouvrir lentement et entièrement le robinet (tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) (5).
- Connecter l'équipement (3 ou 4). Régler le débit (tourner le sélecteur (2) en augmentant jusqu'au débit souhaité) uniquement si l'équipement est connecté à la sortie de débit (4).

Après utilisation:

- Fermer le robinet (5) (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Laisser chuter la pression et déconnecter l'équipement (3 ou 4).
- Remettre le sélecteur de débit (2) sur la position « 0 » (tourner le sélecteur en diminuant le débit jusqu'à zéro).

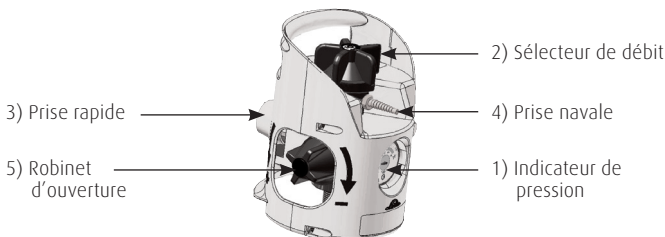

Information de sécurité supplémentaire:

- Température d'utilisation: -20° à $+45^{\circ}\text{C}$.
- Utiliser uniquement avec des dispositifs conçus pour l'administration du produit.
- Changer la bouteille lorsque l'aiguille de l'indicateur de pression entre dans la zone rouge.
- S'assurer que le sélecteur de débit est positionné sur un chiffre de réglage de débit, et non entre deux positions (pour assurer un débit prescrit correct).
- Compatible avec les IRM: Force du champs magnétique $\leq 3.0\text{T}$, à l'exception des bouteilles en acier. S'il s'agit d'une bouteille en acier, ceci est entre autres indiqué au moyen d'un autocollant. Maintenir la bouteille à une distance minimale de 30 cm par rapport à l'ouverture de l'aimant.
- En cas d'un robinet qui fuit ou d'un emballage défectueux: fermer le robinet, ce qui arrête le courant de gaz. Isoler l'emballage et le retourner au fournisseur.
- **Lisez attentivement le mode d'emploi et la notice et conformez-y-vous strictement!**

Linde Healthcare Benelux

Pays-Bas:

De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Pays-Bas
 Tel. +31 40 282 58 25, Fax +31 40 281 68 75
 info.lgt.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Belgique & Luxembourg:

Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen, Belgique
 Tel. +32 70 233 826, Fax +32 70 233 828
 info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be